

Remplacement du support d'instruments L1-D1 Grande et petite aspiration avec barrière lumineuse

Réf. **210476GS** support d'instruments pour grande aspiration et **210477KS** pour petite aspiration.

Démontage du support d'instruments



Préparation : Éteignez l'unité.



Figure 1 : Un pion de fixation (diamètre 2 mm) se trouve au milieu du rayon intérieur du support d'instruments. Poussez ce pion vers l'arrière dans la barrette du support d'instruments. Utilisez pour cela un trombone solide ou une aiguille d'un diamètre maximal de 2 mm. Un nouveau pion de fixation est joint au support d'instruments de remplacement.



Figure 2 : Deux perçages se trouvent sous le support d'instruments. Insérez une pince pour circlips intérieurs coudée dans ces perçages et serrez la pince. Cela relâche la tension du blocage et le support d'instruments peut être retiré par le haut.



Figure 3 : Tirez prudemment le support d'instruments vers le haut. Veillez impérativement à ne pas endommager les raccordements de câbles.

Figure 4 : Débranchez le connecteur du support d'instruments.

Montage du support d'instruments

- Le montage du support d'instruments s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.
- **ATTENTION !** Lors de l'insertion du support d'instruments sur l'Unit praticien, veillez à ce que les raccordements de câbles ne soient pas écrasés ou endommagés ! Insérez le support d'instruments jusqu'à la butée.
- Remettez l'unité sous tension après le montage et effectuez un test de fonctionnement du support d'instruments (barrière lumineuse).