

Wartungsset Wassertrenneinheit (WTE) L2-D2 Serie_V1.1

Maintenance Set Water Separation Unit (WSU) L2-D2 Range_V1.1

Wartungsset Maintenance Set	Bestellnummer Order number	Anzahl Quan- tity	Einheit Unit	Bezeichnung/ Description
211393	-	1	Set	Wartungsset Wassertrenneinheit (WTE) L2-D2 Serie Maintenance Set Water Separation Unit (WSU) L2-D2 Range
	514401	1	Stück	Bio-Filter ae-aqua Edelstahlring Bio-filter ae-aqua, stainless steel ring
	230014-E31	1	Stück	Wassereingang Schlauch mit Perlatorwinkel (WTE) Water inlet tube with aerator angle (WSU)
	230014-E37	1	Stück	Rückschlagventil mit Schlauch Einlass Dosierzylinder Non-return valve with tube Input Dispensing Cylinder
	230014-E38	1	Stück	Rückschlagventil mit Schlauch Auslass Dosierzylinder Non-return valve with tube Outlet Dispensing Cylinder





SERVICE-MODE!

Taster der WTE (Wassertrenneinheit) 8 Sekunden gedrückt halten.

Taster der WTE leuchtet weiß.

Mischbehälter, Doppelkolbenpumpe und erforderlichenfalls alle wasserführenden Leitungen der Dental-Einheit werden leer gepumpt. Hierzu müssen die Instrumente und Becherfüller aktiviert werden, um das Wasser aus den Wasserwegen zu bekommen. Das Ende des Leerens wird durch ein weißes Doppelblinker signalisiert. Danach ist die WTE im Standby. Der LED-Ring des Tasters ist aus.




SERVICE MODE!

Keep the push-button of the WSU (Water separation unit) pressed for 8 seconds.


The push-button of the WSU lights up white.

The mixing tank, the double-piston pump and, if necessary, all the tubing of the dental unit are pumped empty. For this purpose, the instruments and the glass filler must be activated to get the water out of the water lines.

Completion of the emptying process is indicated by a white double flashing. After that, the WSU is in standby mode. The LED-ring of the push-button is switched off.

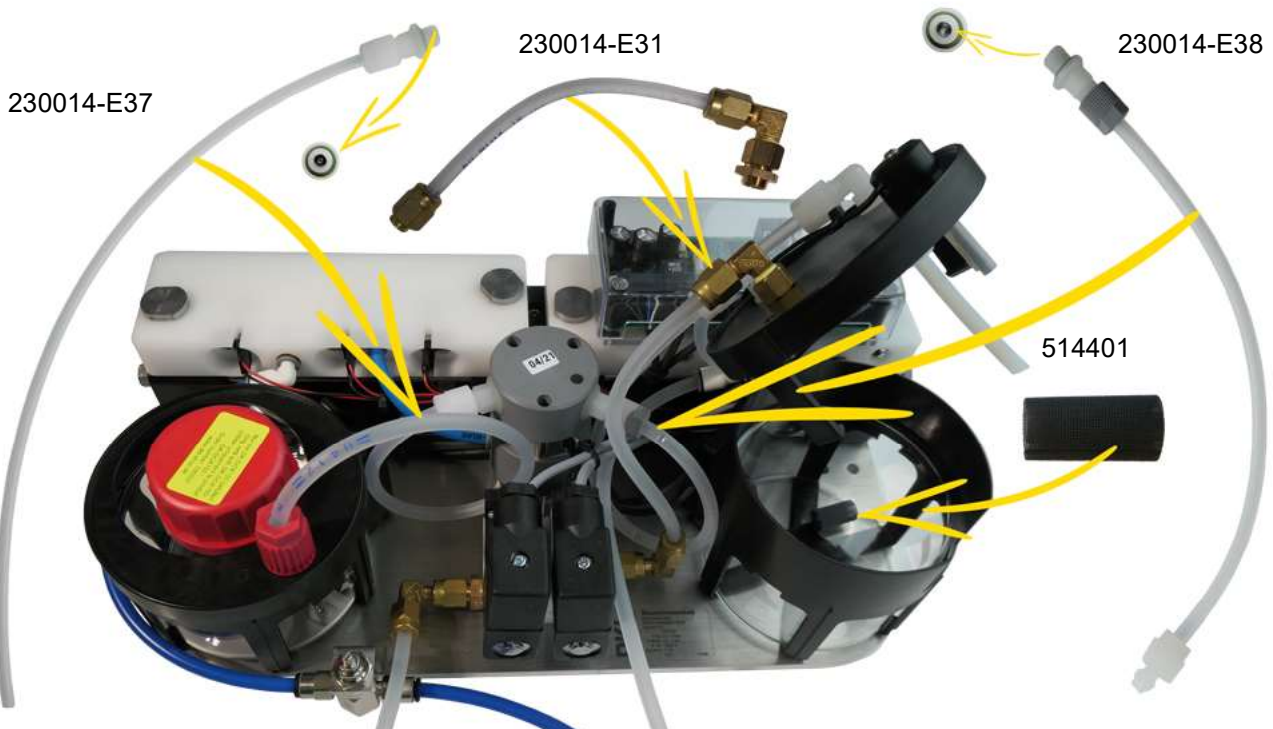

Einlass und Auslass Rückschlagventil mit Schlauch an der Dosierpumpe tauschen.
Replace the inlet and outlet of the non-return valve with tube on the dosing cylinder.

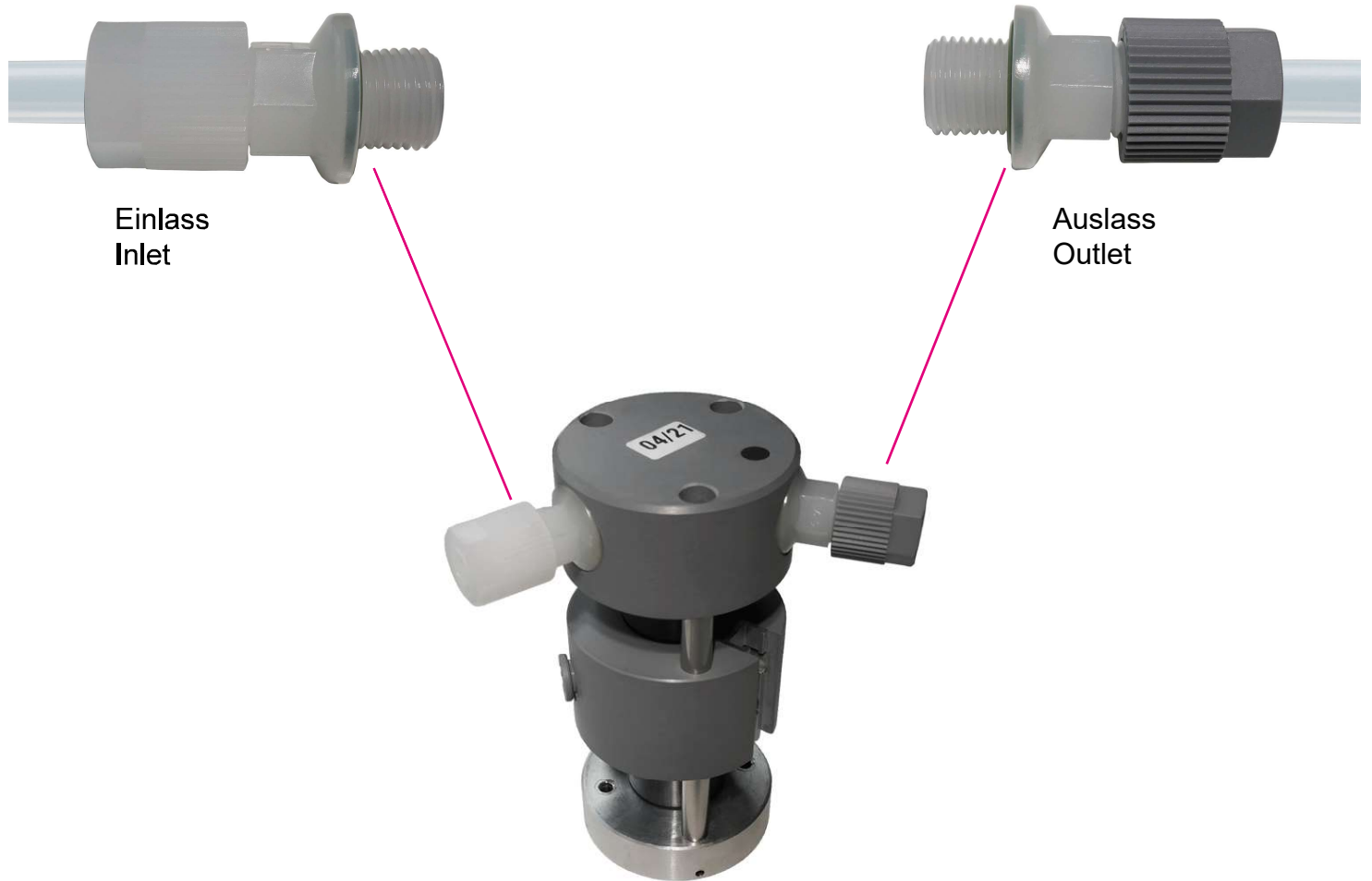

Glasschale zum Vorratsbehälter reinigen, desinfizieren und Biofilter erneuern.
Clean the glass bowl of the storage tank, disinfect it and replace the biofilter.



Neuen Filter in die Glasschale legen.
Place the new filter in the glass bowl.

Wassereingangsschlauch für Vorratsbehälter tauschen.
Replace the water inlet tube for the storage tank.



DKL WARTUNGSSET DER WASSERTRENNEINHEIT WTE



DKL MAINTENANCE SET FOR THE WATER SEPARATION UNIT WSU



KIT DE MAINTENANCE DKL POUR L'UNITÉ DE SÉPARATION DE L'EAU
USE