

Austausch der L1-D1 Instrumentenablage Großer und kleiner Sauger mit Lichtschranke

Art.-Nr. **210476GS** Instrumentenablage für großen Sauger und **210477KS** für kleinen Sauger.

Demontage der Instrumentenablage



Vorbereitung: Schalten Sie die Einheit aus.



Abbildung 1: Mittig im Innenradius der Instrumentenablage befindet sich ein Fixierstift (Durchmesser 2 mm). Drücken Sie diesen Stift nach hinten in die Leiste der Instrumentenhalterung durch. Verwenden Sie dazu eine stabile Büroklammer oder eine Nadel mit einem maximalen Durchmesser von 2 mm. Ein neuer Fixierstift liegt der Ersatz-Instrumentenablage bei.



Abbildung 2: Unterhalb der Instrumentenablage befinden sich zwei Bohrungen. Setzen Sie eine abgewinkelte Sicherungsringzange für Innenringe in diese Bohrungen an und drücken Sie die Zange zusammen. Dadurch löst sich die Spannung der Arretierung, und die Instrumentenablage kann nach oben entnommen werden.



Abbildung 3: Ziehen Sie die Instrumentenablage vorsichtig nach oben heraus. Achten Sie dabei unbedingt darauf, die Kabelanschlüsse nicht zu beschädigen.

Abbildung 4: Trennen Sie die Steckerverbindung der Instrumentenablage.

Montage der Instrumentenablage

- Die Montage der Instrumentenablage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demontage.
- **ACHTUNG!** Achten Sie beim Einsetzen der Instrumentenablage darauf, dass die Kabelanschlüsse nicht gequetscht oder beschädigt werden! Führen Sie die Instrumentenablage bis zum Anschlag ein.
- Schalten Sie die Einheit nach der Montage wieder ein und führen Sie einen Funktionstest der Instrumentenablage (Lichtschranke) durch.